



<b>1. Úvod</b>	<b>1</b>
<b>2. Kompatibility zařízení Mallya<sup>D</sup></b>	<b>1</b>
<b>3. Specifikace rádiového přenosu a EMC</b>	<b>2</b>
<b>3.1 Ztráta připojení</b>	<b>2</b>
<b>3.2 Kvalita bezdrátové služby</b>	<b>2</b>
<b>3.3 Bezdrátová koexistence</b>	<b>3</b>
<b>3.4 Bezdrátový přenos a kybernetická bezpečnost</b>	<b>3</b>
<b>3.5 Elektromagnetická kompatibilita</b>	<b>3</b>
<b>3.5.1 Obecná opatření a varování</b>	<b>3</b>
<b>3.5.2 Elektromagnetické emise</b>	<b>3</b>
<b>3.5.3 Elektromagnetická odolnost</b>	<b>4</b>
<b>4. Materiály</b>	<b>5</b>
<b>5. Obecné informace</b>	<b>5</b>

## 1. Úvod

Tento dokument obsahuje dodatečné technické informace, které nejsou uvedeny v uživatelské příručce (IFU). Informace o skladování, přepravě, čištění a používání naleznete v uživatelské příručce Mallya<sup>®D</sup> (IFU). Před použitím zařízení si přečtěte uživatelskou příručku (IFU).

## 2. Kompatibility zařízení Mallya<sup>D</sup>

Mallya<sup>D</sup> vám umožňuje::

- Zaznamenávat množství injikované perem injekčního pera
- Zaznamenávat datum a čas každé injekce,
- Přenášet dávku, čas a datum každé injekce do mobilní aplikace na chytrém telefonu, pokud je zařízení připojeno pomocí technologie Bluetooth<sup>®</sup>.

Mallya<sup>D</sup> je navrženo pro injekční pera Novo Nordisk<sup>®</sup> pro léčbu cukrovky.

Molekuly a s nimi spojené koncentrace kompatibilní s MallyaD k datu tohoto dokumentu jsou uvedeny v tabulce níže:

Molekula	Koncentrace	Název léku v [zemi]	Hodnota dávky pro 1 přírůstek	Volič dávky pera: <i>Min. dávka až Max. dávka</i>
Degludec	100 IU/mL	Tresiba® 100 FlexTouch®	1 IU	1 až 80 IU
	200 IU/mL	Tresiba® 200 FlexTouch®	2 IU	2 až 160 IU
Detemir	100 IU/mL	Levemir® FlexTouch®	1 IU	1 až 80 IU
Aspart	100 IU/mL	Novorapid® FlexTouch®	1 IU	1 až 80 IU
	100 IU/mL	Fiasp® FlexTouch®	1 IU	1 až 80 IU
Degludec + Aspart	100 IU/mL	Ryzodeg® FlexTouch®	1 IU	1 až 80 IU
Degludec + Liraglutide	100 IU/mL + 3,6 mg/mL	Xultophy®	1 IU	1 až 50 IU
Semaglutide	1,34 mg/mL	Ozempic® 0,25 mg	0,01316 IU	0,25 mg
	1,34 mg/mL	Ozempic® 0,5 mg	0,01316 IU	0,50 mg
	1,34 mg/mL	Ozempic® 1 mg	0,01316 IU	1 mg
Icodec	700 IU/mL	Awikli® FlexTouch®	10 IU	10 IU až 700 IU

Tabulka 1 – Kompatibilita Mallya<sup>P</sup> s injekčními perý Novo Nordisk FlexTouch – Molekuly a koncentrace

### 3. Specifikace rádiového přenosu a EMC

#### 3.1 Ztráta připojení

Mallya<sup>P</sup> používá připojení Bluetooth® Low Energy (BLE) ke komunikaci s vaším chytrým telefonem. Spojení BLE mezi Mallya<sup>P</sup> a chytrým telefonem se může z různých důvodů přerušit. Jakmile se chytrý telefon znovu připojí k lékařskému zařízení, aplikace si bude moci vyžádat injekce, které jí chyběly.

Mallya<sup>P</sup> má kapacitu pro uložení 100 injekcí; pokud během odpojení dojde k více než 100 injekcím, nejstarší injekce bude nahrazena nejnovější.

Bluetooth®

### 3.2 Kvalita bezdrátové služby

Limity komunikace přes Bluetooth®:

Kompatibilní aplikace vás může informovat, že komunikace přes Bluetooth byla přerušena.

Pokud je kompatibilní aplikace a Mallya<sup>P</sup> používána v hlučném prostředí (v oblasti elektromagnetických signálů blízkých 2,4 GHz), nebo pokud jsou od sebe příliš vzdáleny, nebude mezi nimi možná komunikace a spojení se přeruší. Nicméně Mallya<sup>P</sup> bude nadále sledovat a zaznamenávat historii všech vašich injekcí. Jakmile se chytrý telefon znovu připojí k zařízení Mallya<sup>P</sup>, aplikace bude schopna integrovat nezaznamenané injekce (až do 100 injekcí).

Typ Bluetooth LE	BLE v4.2
Frekvenční pásmo	[2400-2483.5] MHz
Rozestup kanálů	2 MHz
Šířka pásma kanálu	1 MHz
Typ antény	Integrovaná
Maximální EIRP (ekvivalentní izotropicky vyzařovaný výkon)	< -8 dBm

Tabulka 2 – Bezdrátová služba

### 3.3 Bezdrátová koexistence

Klíčovým faktorem, který může ovlivnit výkon bezdrátového lékařského zařízení Mallya<sup>D</sup>, je omezené množství dostupného RF spektra, což může vést k potenciální konkurenci mezi bezdrátovými technologiemi o současný přístup ke stejnému spektru. Aby se předešlo přerušením komunikace způsobeným bezdrátovou koexistencí, společnost BIOCORP PRODUCTION doporučuje následující vzdálenosti mezi zařízením a zamýšleným společníkem:

*Během párovací fáze:*

Doporučená vzdálenost oddělení	Méně než 12 palců (30 cm)
--------------------------------	---------------------------

*Během používání:*

Doporučená vzdálenost	Méně než 7 stop (2,15 m)
-----------------------	--------------------------

#### **Pozor**

V případě problémů s bezdrátovou koexistencí nebude Mallya<sup>D</sup> schopna komunikovat se svou dedikovanou aplikací, ale injekce budou stále sledovány a zaznamenávány a aplikace je bude moci později načíst.

### 3.4 Bezdrátový přenos a kybernetická bezpečnost

BIOCORP PRODUCTION doporučuje, aby uživatel provedl proces párování v soukromém prostředí, například doma, aby se předešlo odposlechu nebo možným útokům na tento proces. Jakmile je toto provedeno, Mallya<sup>D</sup> nemá žádné zvláštní bezpečnostní požadavky.

### 3.5 Elektromagnetická kompatibilita

#### 3.5.1 Obecná opatření a varování

#### **Pozor**

- Použití tohoto zařízení spolu s jiným zařízením (nebo na sobě naskládaným) by mělo být vyloučeno, protože by mohlo dojít k poruše. Pokud je takové použití nezbytné, je třeba toto zařízení a ostatní zařízení sledovat, aby bylo zajištěno jejich normální fungování. Pokud je takové použití nezbytné, je třeba toto zařízení a ostatní zařízení sledovat, aby bylo zajištěno jejich normální fungování.
- Použití příslušenství, převodníků a kabelů jiných, než jaké specifikoval nebo dodal výrobce tohoto zařízení, může vést ke zvýšení elektromagnetického vyzařování nebo snížení elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení, což může způsobit jeho poruchu.

Mallya<sup>D</sup> nemá žádné zásadní požadavky na výkon nebo bezpečnost.

Zařízení Mallya<sup>D</sup> CND1 bylo testováno v souladu s doporučeními normy IEC TR 60601-4-2: Lékařská elektrická zařízení - Část 4-2: Pokyny a interpretace - Elektromagnetická odolnost: výkon lékařských elektrických zařízení a lékařských elektrických systémů.

#### 3.5.2 Elektromagnetické emise

Emise	
RF emise	CISPR 11 / Skupina 1 Třída B
Harmonické zkreslení IEC 61000-3-2	Není relevantní
Kolísání napětí a blikání IEC 61000-3-3	Není relevantní

### 3.5.3 Elektromagnetická odolnost

Odolnost				
Test	Požadavek	Úroveň shody (V/m)		
Elektrostatické výboje IEC 61000-4-2	± 8 kV při kontaktu ± 2/4/8/15 kV ve vzduchu	± 8 kV při kontaktu ± 2/4/8/15 kV ve vzduchu		
Vyzařovaná RF elektro- magnetická pole IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80 % AM na 1 kHz	10 V/m 80 MHz-2,7 GHz 80 % AM na 1 kHz		
Blízká pole vyzařovaná bezdrátovými RF komuni- kačními zařízeními IEC 61000-4-3	Frekvence (MHz)	Modulation	Level required (V/m)	Conformity level (V/m)
	385	Pulsní modulac: 18 Hz	27	27
	450	Pulsní modulac: 18 Hz	28	28
	710 – 745 – 780	Pulsní modulac: 217 Hz	9	9
	810 – 870 – 930	Pulsní modulac: 18 Hz	28	28
	1720 – 1845 – 1970	Pulsní modulac: 217 Hz	28	28
	2450	Pulsní modulac: 217 Hz	28	28
5240 – 5500 – 5785	Pulsní modulac: 217 Hz	9	9	
Rychlé/přílivové elektric- ké přechody IEC 61000-4-4	Napájení: ± 2 kV Vstup/výstup: ± 1 kV Frekvence opakování: 100 kHz	Není relevantní (USB kabel <3 m)		
Rázové vlny IEC 61000-4-5	Mezi fázemi: ± 0,5 kV, ± 1 kV Mezi fázemi a zemí: ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV	Není relevantní		
Vedené rušení vyvolané RF poli IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 v ISM a amatérských rádiových pásmech mezi 0,15 MHz a 80 MHz 80 % AM na 1 kHz	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 v ISM a amatérských rádiových pásmech mezi 0,15 MHz a 80 MHz 80 % AM při 1 kHz		
Magnetická pole při síťové frekvenci IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m		
Poklesy a přerušení napětí IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyklu Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270 a 315° 0 % UT; 1 cyklus při 0° 70 % UT; 25/30 cyklů při 0° 0 % UT; 250/300 cyklů	Není relevantní		
Blízká magnetická pole IEC 61000-4-39	134,2 kHz / Pulsní modulace 2,1 kHz / 65 A/m 13,56 MHz / Pulsní modulace 50 kHz / 7,5 A/m 30 kHz / CW / 8 A/m	134,2 kHz / Pulsní modulace 2,1 kHz / 65 A/m 13,56 MHz / Pulsní modulace 50 kHz / 7,5 A/m 30 kHz / CW / 8 A/m		

Tabulka 4 – Odolnost

#### 4. Materiály

Mallya<sup>®</sup>

PC, ABS, SEBS, PP  
Polykarbonát, akrylonitril-butadien-  
styren, polystyren-polyethylen-butylén,  
polypropylen

#### 5. Obecné informace



BIOCORP PRODUCTION  
ZI LAVAUUR - LA BECHADE  
63500 ISSOIRE  
FRANCE  
Tel. : +33 4 73 55 70 50  
[www.biocorpsys.com](http://www.biocorpsys.com)

Číslo modelu: CND1